

Schoonmaken van de CMAC

Doel:


Het voorkomen van besmetting van andere personen met COVID-19 door vervuiling van de CMAC na gebruik bij een (mogelijk) besmette patiënt.

Verantwoordelijke:

De verpleegkundige die voor de patiënt zorgt of een door hem/haar aangewezen persoon.

Voor intubatie:

Stap 1: De sluis ingaan met alleen de juiste maat laryngoscoop en de CMAC.

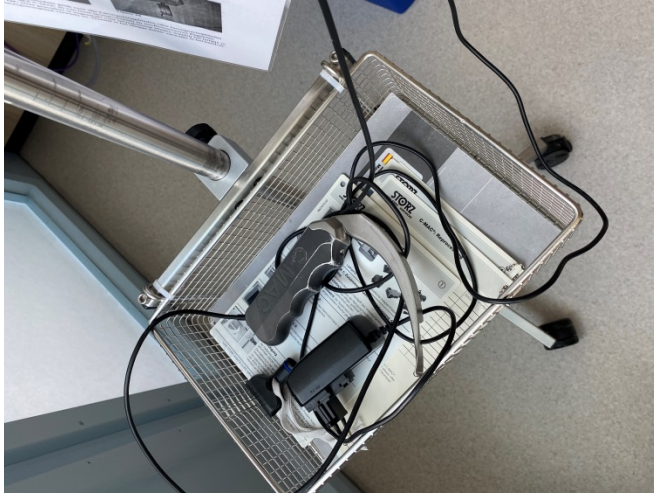

Na intubatie:

Stap 1: De CMAC wordt **in de patiënt-kamer** volledig schoongemaakt met alcohol 70%.

Stap 2: Trek nieuwe handschoenen aan en neem de CMAC mee naar de sluis.

Stap 3: **In de sluis** nogmaals volledig schoonmaken met alcohol 70%.

Stap 4: Het laryngoscoopblad wordt hierna in de sluis in een plasticzakje met knoop gedaan en in de spoelruimte achtergelaten om schoon te maken. Vermeld duidelijk dat deze gebruikt is bij een corona patiënt.



Stap 5: De CMAC kan worden schoongemaakt volgens het normale protocol. Er hoeft geen extra bescherming te worden gedragen.