

**Beste collega,**



**Vanaf 9 november 2020 stappen we over op disposable Jackson Reese systemen / beademingsballonnen.**

**We stappen over omdat de niet disposable harmonica slang van ons huidige systeem niet meer leverbaar is.**



**De ballonnen zijn er in twee maten: 0,5 L en 2 L**



**Aan de ballon zit standaard een zuurstof slang. De zuurstofslang past niet direct op onze zuurstofklok.**



**In de verpakking zit een zakje met een wit (en groen) tussenstukje. Het witte tussenstukje gebruik je om de zuurstofslang aan te sluiten op onze zuurstofklok.**



**Deze week liggen de verschillende ballonnen op kamer 1-9 (wanneer er geen PSG ligt, anders op unit 3). We raden alle verpleegkundigen en artsen aan om naar de ballonnen te komen kijken en te voelen hoe het gevoel is bij beademen. Het is vervelend als je de nieuwe ballon voor het eerst ziet tijdens een acute situatie. Schenk extra aandacht aan het overdruk ventiel, dat is echt anders dan bij ons huidige systeem.**